

# cetron®

Reinigungspulver  
Cleansing Powder  
Nettoyant

1



## Anwendung/Application/Mode d'Emploi:

Inhalt eines Beutels mit ca. 150 ml Wasser mischen,  
Reinigungsobjekt unter fließendem Wasser abspülen und einlegen.

Dissolve the content of a bag in 150 ml of water.  
Rinse the appliance/splint with fresh water.

Diluer le contenu du sachet dans 150 ml d'eau. Rincer l'appareil à nettoyer à l'eau claire et le mettre dans la solution.

2




Ca. 30 min. einwirken lassen. Lösung kann bis zu 1 Woche verwendet werden.

Leave the appliance/ splint for 30 min. in the solution.  
Do not keep mixed solution longer than one week.

Laisser tremper pendant 30 min. La solution reste active pendant une semaine.

3

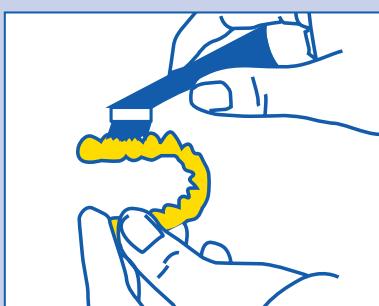


Gelöste Beläge mit Bürste entfernen und Objekt erneut abspülen.

Any remaining sediment can be removed with a toothbrush and fresh water.

Brosser l'appareil avec brosse, puis rincer de nouveau à l'eau claire.

4

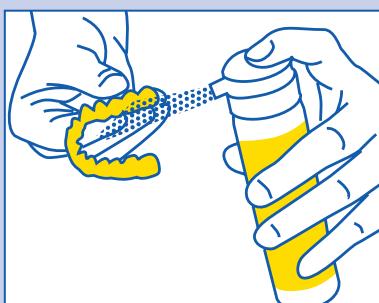

Vor dem Einsetzen pflegt und erfrischt das CETRON®-Spray noch zitroniger.

The care spray refreshes the appliance with citric taste before insertion.

Le spray de soins rafraîchit l'appareil avant de porter avec le gout de citron.